

Zestaw do trokarowej fiksacji trawieńca

Zestaw jest wykonany z nierdzewnego metalu i składa się z trokara oraz dwóch stabilnych rurek trokarowych (kaniul). Służy do wprowadzania zawleczek fiksujących do trawieńca. Trokar z kaniulą wkłewa się przez powłoki brzuszne do światła trawieńca. Wyciąga trokar, a przez kaniulę, pomagając sobie przetyczką (brak w zestawie), wprowadza do trawieńca zawleczkę. W odległości pięciu do siedmiu centymetrów od pierwszego wkłucia za pomocą trokaru wprowadza się drugą kaniulę a następnie drugą zawleczkę. Po umieszczeniu obu zawleczek w trawieńcu wyjmuje się kaniule, stale trzymając nici zawleczek. Obie nici wiąże się z sobą, pozostawiając niewielki luz. Między nicią a skórą należy umieścić podkładkę, aby nić nie wrzynała się w skórę.

